

Link do produktu: <https://www.kajasklep.pl/musze-laktacyjne-kolektory-mleka-1468-baby-ono-p-18068.html>



Musze Laktacyjne – Kolektory Mleka 1468 Baby Ono

Cena	24,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Wysyłka do 24 godzin
Numer katalogowy	AON 1468
Kod EAN	5901435413203
Producent	BabyOno

Opis produktu

Musze Laktacyjne – Kolektory Mleka 1468



Nasze muszlowe kolektory mleka to niezbędny element wyprawki każdej karmiącej mamy. Zbierają pokarm, który wypływa samoistnie z drugiej piersi podczas karmienia dziecka lub korzystania z laktatora. Chronią wrażliwe brodawki przed otarciami i przyspieszają gojenie popękanych brodawek sutkowych.

Kolektory są lekkie, płaskie i dyskretne w noszeniu.

Wykonane z bezpiecznego tworzywa, niezawierającego BPA.

W zestawie 2 sztuki oraz praktyczne etui do przechowywania.

DYSKRETNE

Nasze muszlowe kolektory są bardzo dyskretne.

Zaprojektowaliśmy je tak, aby idealnie leżały w Twoim biustonoszu.

Są lekkie i płaskie.

PODWÓJNE ZASTOSOWANIE

Dzięki zamykanemu otworowi wentylacyjnemu możesz wykorzystać produkt jako tradycyjną muszlę laktacyjną lub kolektor.

DUŻY OTWÓR

Duży, centralnie umieszczony otwór na brodawkę sprawia, że kolektor pasuje do każdego rozmiaru piersi, nie uciskając brodawki.?

ŁATWE PRZELEWANIE

Zebrane mleko z łatwością przelejesz przelejesz do butelki lub woreczka.

PRAKTYCZNE ETUI

W zestawie znajdziesz wygodne etui z wbudowanym stojakiem na muszlę.

Etui pomieści oba kolektory na mleko.

Dzięki temu, zabierzesz je sobą wszędzie, gdzie chcesz - w podróż, czy do pracy.

BEZPIECZNE

Wykonane z bezpiecznego tworzywa, niezawierającego BPA i innych szkodliwych substancji.



Kiedy muszla laktacyjna, a kiedy kolektor?

Muszla laktacyjna – wyciągnij zawleczkę z otworu wentylacyjnego, by zapewnić cyrkulację powietrza.

Stosuj pomiędzy karmieniami, w sytuacji gdy Twoje brodawki są obolałe i chcesz uniknąć ich dalszego podrażnienia ubraniem.

Przyspieszają gojenie popękanych brodawek sutkowych.

Uwaga ?

Zebrany pokarm nie nadaje się do podania dziecku. Wlej go np. do kąpieli.



Muszlowy kolektor – zamknij otwór wentylacyjny.

Stosuj podczas karmienia piersią lub w trakcie korzystania z laktatora.

Zebrany pokarm możesz przelać do butelki i podać dziecku do jedzenia.

Nasz kolektor jest bardzo prosty w budowie.

Składa się tylko z 3 elementów, dzięki czemu szybko i bezproblemowo możesz go rozłożyć i wyczyścić.

Specjalnie zaprojektowana zawleczka pozwoli Ci zawiesić kolektor do wyschnięcia.

WAŻNE:

Przed pierwszym użyciem i po każdym następnym użyciu należy umyć i zdezynfekować muszle i wkładki silikonowe.

CZYSZCZENIE:

Do czyszczenia stosuj miękkie szczotki lub gąbki.

Użycie twardych, ostrych materiałów może spowodować zarysowania produktu.

Muszle laktacyjne możesz dezynfekować w sterylizatorze parowym, zagotować w gorącej wodzie przez około 4 minuty.

**Dane techniczne:**

Materiał: PP, silikon
2 szt. kolektorów
Etui: w zestawie
Pojemność: 2x20 ml
Wymiary: 10 x 10 x 3 cm
Waga: 36 g

Specyfikacja:

- kod produktu: 1468
- EAN: 5901435413203
- 2 szt w opakowaniu

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem.

Stosuj wyłącznie czysty produkt.

Produkt przechowuj w suchym miejscu, unikaj światła słonecznego.

Jeżeli zauważysz oznaki uszkodzenia produktu, wymień produkt na nowy.